

NODEC P[®]



**MATRATZENERSATZ-
SYSTEM FÜR HÖCHST-
RISIKOPATIENTEN UND
BEI BESTEHENDEN
DEKUBITALGESCHWÜREN
ALLER STADIEN**

**REAKTIVE HYPERÄMIE
ZUR UNTERSTÜTZUNG
DER HEILUNGSPROZESSE
DURCH AKTIVE
ZELLENTLEERUNG**

**PATIENTENKOMFORT
DURCH
VERLÄNGERUNGS-
MÖGLICHKEIT
AUF 210 CM**

NULL-DRUCK-TECHNOLOGIE – MIT SPEZIELLEM MATRATZENAUFBAU UND FUNKTIONALITÄT

- Einfache Bedienung und Einstellung der Betriebsart durch klare Displayanzeige
- Sicherheit durch akustische und optische Alarmfunktionen
- Automatische Druckeinstellung auf das Patientengewicht
- Sicherheit in allen Notfallsituationen durch einfache und schnelle Entlüftung des NoDec CPR Ventils
- Weichlagerung durch Komforteinstellung (weich – medium – hart) möglich
- Statischer Modus für Patientenkomfort und ruhigen Schlaf
- 3-Zellen Wechseldruck-Nulldruck-Technologie
- Hautfreundlicher, desinfizier – und waschbarer, bi-elastischer Bezug bietet optimale Hygiene und Minimierung der Scherkräfte
- Verschleißarm und wartungsfreundlich durch Mikroprozessorsteuerung
- Hoher Patientenkomfort durch besonders geräuscharmes Aggregat
- Einfaches Umlegen von zwei Ventilen ermöglicht eine Verlängerbarkeit von 200 auf 210 cm
- Maximale Füllung für pflegerische Maßnahmen
- Optimale Patientensicherheit und Stabilisierung mittels innenliegender Längszellen und doppelagigem Matratzenaufbau



NULLDRUCKTECHNOLOGIE MIT SPEZIELLEM MATRATZENAUFBAU:

Jeweils 3 nebeneinander liegende Zellen werden mit den darunter liegenden Zellen synchron gefüllt und entleert. Der hierdurch entstehende Nulldruck erreicht durch Wellenbewegung alle 5 Minuten die nächste Zelle und es entsteht eine vollständige Druckentlastung für 2 Minuten.

TECHNISCHE DATEN



Matratze	
Abmessungen	200 x 90 x 23 cm (LxBxH)
Material	Polyester mit Polyurethan
Reinigung	Bezug waschbar bei 90 °C, Desinfektion mit DGHM gelisteten Desinfektionsmitteln
Patientengewicht	30 bis 250 kg
Aufbau	20 Zellen, davon eine Zelle gesondert entleerbar

Aggregat	
Abmessungen	48 x 15 x 30 cm (LxTxH)
Gewicht	7,7 kg
Zyklusdauer	15 Minuten
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Stromaufnahme	50 W

© 2012 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelsmarken und Trademarks (TM) sind Eigentum von GerroMed und deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen. Stand der Informationen: August 2012

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO13485

