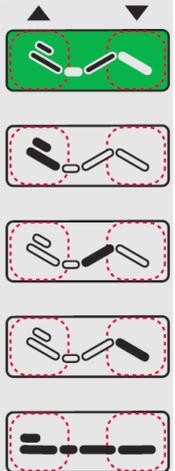
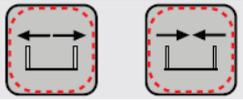
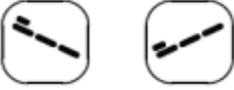


Kurzanleitung GerroBed Bari

 <p>a) </p> <p>b) </p> <p>c) </p> <p>d) </p> <p>e) </p>	<p>Einstellen der Liegeflächenfunktionen (Handschalter kann dem Patienten nach Einweisung überlassen werden)</p> <p>a) Grüne Taste Zur Erzielung eines optimalen Sitz-/Liegekomforts werden Rücken- und Oberschenkelteil gleichzeitig angehoben.</p> <p>b) Rückeneinstellung</p> <p>c) Oberschenkeneinstellung</p> <p>d) Einstellung des Fußendes Das Fußende wird angehoben, ggfs. erfolgt eine Absenkung der Oberschenkel</p> <p>e) Höhenverstellung der Liegefläche (44 - 88 cm)</p>
	<p>Einstellen der Liegeflächenbreite</p> <p> Personalhandschalter. Darf dem Patienten nicht überlassen werden!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matratzenbreite verstellbar von 90 - 120 cm. - Äußere Breite verstellbar von 101 - 131 cm. - Die Breite ist dem Bedarf des Patienten anzupassen. <p> Beim Ein- /Aussteigen über die Seite, ist zuerst immer die Liegeflächenbreite auf die schmalste Position zu stellen. Bei Verwendung luftgefüllter Matratzensystemen ist zum Zusammenfahren Luft abzulassen.</p>
<p>a) </p> <p>b) </p> <p>c) </p> <p>d) </p>	<p> Personalhandschalter. Darf dem Patienten nicht überlassen werden!</p> <p>a) Trendelenburg / Antitrendelenburg Z. B. einsetzbar für eine komfortable Sitzposition</p> <p>b) Ein- und Aussteigen am Fußende Ermöglicht dem Patienten, über das Fußende ein- bzw. aussteigen. Entfernen Sie zunächst das Fußenteil. Durch Drücken der <i>Aussteige</i>-Taste (rechts) fährt die Liegefläche in Sitzposition. Danach senkt sich das Fußende ganz ab. Der Patient kann das Bett über das Fußende verlassen. Weitere Betätigung der <i>Aussteige</i>-Taste hebt das Fußende an, und hilft dem Patienten in stehende Stellung zu kommen. Durch Betätigung der <i>Einsteigsfunktion</i> (links) erfolgt eine Absenkung in entgegengesetzter Reihenfolge.</p> <p> Achten Sie sowohl auf den Patienten als auch auf das Bett. Das Aussteigen lässt sich jederzeit durch ein Loslassen der Taste unterbrechen.</p> <p>c) Räder / Beinlift Die Funktionen sind mit einer einzelnen Betätigung zu aktivieren. Bis zur völligen Erreichung der Endposition piept die Schaltbox. Betätigen Sie <i>Bein abwärts</i> (rechts), um das Bett sicher auf seine 4 Beinen zu stellen. Betätigen Sie <i>Rad abwärts</i>, um mit dem Bett fahren zu können.</p> <p> Versichern Sie sich nach einem Transport, dass das Bett fest auf allen Beinen steht, und dass alle Räder in die höchste Stellung gefahren worden sind.</p> <p>d) Planebene / Senkfunktion - CPR-Taste Alle Funktionen werden auf die niedrigste Ebene gesenkt.</p>

KA/GBB/2025-01

www.gerromed.de


GerroMed

GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH

Papenreye 55 · D-22453 Hamburg · Telefon 040 54 73 03-0 · Fax 040 54 73 03-33 · www.gerromed.de · mail@gerromed.de

Kurzanleitung GerroBed Bari

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen und befolgen

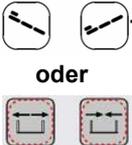Anwendung	Das GerroBed Bari wurde für die Bariatrie entwickelt und für die Handhabung von Personen mit einem Gewicht von bis zu 400 kg und einer Nennlast von 450 kg (SWL) entwickelt.
Sicherheitsbestimmungen 	<p> Mögliche Gefahren und wie man sie vermeidet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei der manuellen oder elektrischen Bedienung des Bettes besteht Klemmgefahr zwischen den beweglichen Teilen. Achten Sie darauf, dass niemand beim Anheben des Bettes eingeklemmt wird. - Achten Sie beim Einsatz der Handbedienung immer auf das Bett. Stellen Sie sicher, dass niemand während der Bedienung des Bettes eingeklemmt wird. - Kriechen Sie niemals unter das Bett. <p> Fehlfunktion bei nicht erfolgter Wartung. Die Wartungsintervalle sind einzuhalten. Die Benutzung eines defekten Bettes ist nicht zulässig.</p> <p> Überlastung. Die max. zulässige Belastung des Bettes darf nicht überschritten werden - SWL 450 kg.</p> <p> Fehlbedienung. Übergeben Sie die Handbedienung nur einer Person, von der Sie wissen, dass sie mit der Bedienung und den Funktionen vertraut gemacht worden ist. Befolgen Sie die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.</p>
Seitenteile / Stützgriffe	Die Seitenteile / Stützgriffe sind in Liege- und Sitzposition sowie als Ausstiegshilfen und zur Mobilisation zu benutzen.
Stirnseitenteile	Entfernen Sie beim Aussteigen über das Fußende das Fußenteil durch Ziehen der unter dem Bettrahmen befindlichen Bolzen.
Liegeflächenverlängerung	Die Liegefläche ist am Fußende um 20 cm (von 210 – 230 cm) verlängerbar. Bei der Verlängerung ist das Festdrehen der Rändelschrauben sehr wichtig.
Stromversorgung	Befindet sich das Bett im Krankenzimmer, schließen Sie es immer an 230V an. (Für die Bettfunktionen ist eine voll aufgeladene Batterie wichtig.)
Batteriefunktion	Bei voll aufgeladener Batterie sind ca. 10 - 15 Bedienungsschritte möglich.
Reinigen des GerroBed Bari	Wischdesinfektion gemäß hauseigenem Hygieneplan für Elektrobetten. Verwenden Sie herkömmliche Reinigungsmittel oder eine 4 %ige Chlor- und 70 %ige Spirituslösung. Bett nach dem Reinigen trocknen. ACHTUNG: Nicht unter fließendem Wasser oder mit Hochdruckreinigern reinigen, nicht waschstraßentauglich.
Mögliche Funktionsprobleme 	Eventuelle Funktionsprobleme lassen sich durch Nullstellen der Schaltbox beheben. <ol style="list-style-type: none"> 1. Dies geschieht durch gleichzeitiges, ca. 10sekündiges Drücken der links abgebildeten Tastenkombinationen. Sollte durch eine Kombination keine Rückstellung erfolgen, verwenden Sie die andere. 2. Piept die Schaltbox, befolgen Sie Schritt 1 bis die Schaltbox aufhört zu piepen.  Fahren Sie das Bett danach in die unterste Position.
Richtungssperre	Treten Sie den Hebel für die Richtungssperre am Fußende des Bettes herunter, die Rollen fahren nun nur noch Geradeaus.
Service und Wartung	Es ist jährlich eine Inspektion durchzuführen.